



Couplage du lecteur avec myDiabby

Lorsque vous coupez votre lecteur de glycémie Fora Diamond Mini à l'application myDiabby, la date et l'heure se règlent automatiquement sur le lecteur à partir de la date et heure du téléphone.

1 Activez le **Bluetooth** sur le **smartphone**

2 Connectez-vous sur l'**application myDiabby** et ouvrez l'onglet «**Mes objets connectés**»

3 Cliquez sur le bouton «**Je connecte mon lecteur**»

4 Activez le **Bluetooth** sur le **lecteur en l'allumant** puis l'éteignant. Pour cela, le plus simple est de :

- Insérez une bandelette dans le lecteur
- Attendez 1 seconde que le lecteur s'allume et soit prêt à faire une mesure de glycémie
- Retirez la bandelette du lecteur




Le lecteur s'éteint et la **lumière bleue clignote** : le **Bluetooth du lecteur** ✱ est allumé

5 Sur l'**application myDiabby**, cliquez sur le bouton «**Rechercher mon lecteur**»

6 Le lecteur apparaît à l'écran. Cliquez sur «**Ajouter**»

Votre lecteur de glycémie est maintenant couplé à votre application myDiabby !

Si vous voulez transférer des données déjà mesurées avec ce lecteur sur myDiabby, appuyez sur le bouton "Synchroniser mon lecteur"

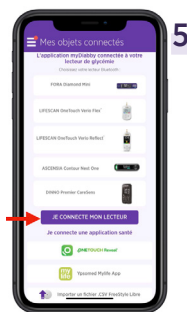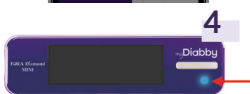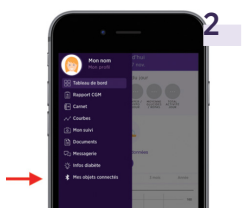

Utilisation quotidienne

- 1 Faire la mesure de glycémie avec le lecteur de glycémie comme habituellement.



- 2 Une fois que le **résultat de glycémie apparaît à l'écran du lecteur**, retirez la bandelette du lecteur, puis **ouvrez l'application myDiabby sur le téléphone à proximité du lecteur**.

(Vérifiez que le Bluetooth est bien actif sur le smartphone)

- 3 Le résultat de glycémie s'envoie automatiquement sur myDiabby !

